



Un Dispozitiv, Soluții Multiple

StarFormer[®]

Remodelare corporală magnetică și întărirea musculaturii

STARFORMER®



StarFormer® este cea mai recentă inovație Fotona în remodelarea corporală. Această tehnologie inovatoare utilizează energia pulsului magnetic pentru a stimula contracția musculară. Ca rezultat, mușchii se întăresc, se tonificază și devin mai fermi. Sistemul oferă două opțiuni de tratament:

- **TightWave®**


Întărirea musculară, tonifierea și întărirea zonelor slăbite

- **IntimaWave®**

Întărirea mușchilor pelvieni pentru tratarea incontinenței urinare de efort

Cum funcționează?

StarFormer® folosește tehnologia de stimulare magnetică pentru a viza selectiv țesuturile musculare. Pulsurile magnetice pătrund inofensiv în straturile musculare, făcându-le să se contracte automat. Rezultatul final este creșterea masei musculare.

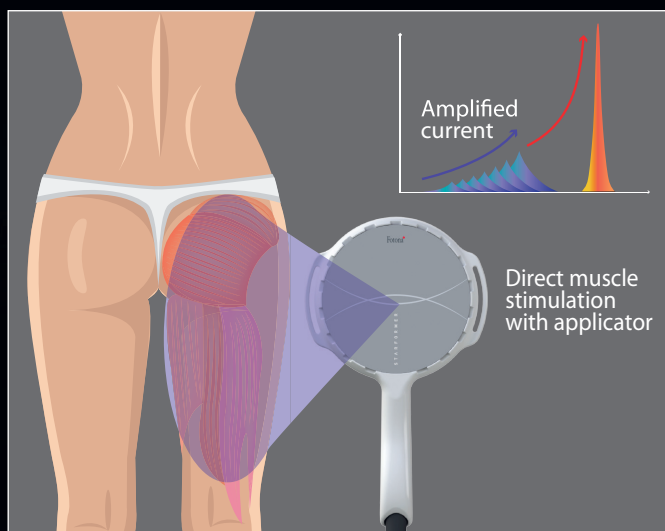

TIGHTWAVE®

TightWave® este un tratament inovator pentru întărirea, modelarea și fermitatea eficientă a diferitelor zone ale corpului:



- Fesieri
- Abdomen
- Zona ischiogambierelor
- Brațe
- Mușchii spatelui



Tratamentul se efectuează cu pacientul întins complet îmbrăcat. O ședință durează în general între 20 și 30 de minute, pacienții reluându-și activitățile zilnice imediat după tratament.

INTIMAWAVE®

StarFormer® poate fi folosit suplimentar pentru a stimula mușchii pelvieni și spatele, utilizând două aplicatoare pentru a trata toate tipurile de incontinență urinară și fecală masculină sau feminină. În timpul tratamentului, pacientul rămâne complet îmbrăcat și stă pe un scaun confortabil IntimaWave®. Aplicatoarele magnetice din scaun stimulează contracția musculară în întreaga zonă pelvină, crescând forța și rezistența mușchilor pelvieni. Rezultatul este ameliorarea eficientă și pe termen lung a fluxului necontrolat de urină.




Before



Pelvic floor muscles insufficiently support pelvic organs effecting bladder control.

After

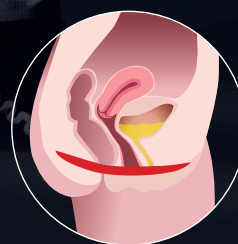


Magnetic stimulation induces pelvic floor muscle strengthening and the return of normal continence function.

STARFORMER®

Beneficii Cheie

- Întărirea musculară sigură, rapidă și ușoară
- Neinvaziv
- Îmbunătățire după doar câteva ședințe
- Procedura de intrare/ieșire
- Rată ridicată de succes și satisfacție a pacientului

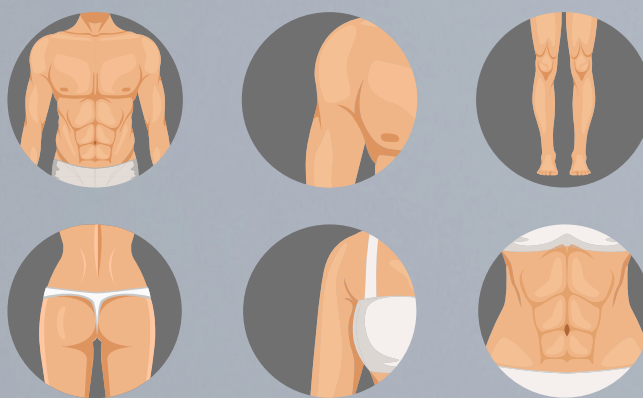

Nume dispozitiv:	Fotona StarFormer®
Input voltage:	100-240V AC, 50~60Hz
Power:	1500 VA
IP protection:	IPX0
Size (W x L x H):	421 mm x 630 mm x 843 mm
Weight:	50 kg
IEC 60601/1 classification:	Class I, Type BF
MDD 93/42/EEC classification:	Class IIa

CE
2265

Toate dispozitivele medicale Fotona sunt marcate CE și aprobate pentru a fi vândute în UE. Pentru țările în care sunt necesare aprobări sau autorizații naționale specifice, este posibil ca unele dintre produse și/sau aplicații să nu fi fost încă aprobate. Vă rugăm să verificați cu Fotona, cu distribuitorul local Fotona sau cu organismul național de reglementare dacă un anumit produs sau aplicație a fost aprobat pentru a fi comercializat și vândut în țara dumneavoastră.

Pentru brevetele conexe, consultați: www.fotona.com/patents

www.fotona.com

Fotona, d. o. o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia
EU

Fotona, LLC
2307 Springlake Road
#518
Dallas, TX 75234
USA

Fotona Beauty Light, (Suzhou)
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town
Changshu City, Jiangsu Province
CHINA, 215515

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen,
Germany
EU

Fotona France SARL
47 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
France
EU